


# Tristel Duo™

# OPH

## Korkeatasoinen desinfiointivaahdo

TONOMETRIEN UUELLEEN  
KÄYTETTÄVILLE PRISMOILLE

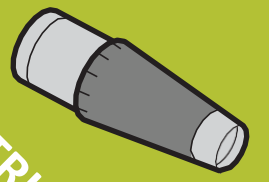

### Huomautuksia:

- Älä käytä, jos pullo on vaurioitunut.
- Desinfioi kädet ja käytä asiaankuuluvia henkilökohtaisia suojarusteita, kun käsittelet desinfiointiaineita ja lääkinnällisiä laitteita.
- Kun käytät Tristel Duo OPH:ta ensimmäistä kertaa, paina pumpppua alkuun 2–4 kertaa tuotteen valmistelemiseksi käyttöön.
- Jos laitteen pinta on näkyvästi likainen, noudata sairaalan puhdistusohjeisiin liittyvää protokollaa.
- Ammattikäyttöön.
- Tätä seinätaulua tulee käyttää yhdessä käyttöohjeiden, tuotteen kilveltä löytyvien tietojen, käyttöturvallisuustiedotteen ja laitteen valmistajan ohjeiden kanssa.

VAIHE 1



Annostele kaksi pumpppausta Tristel Duo OPH:ta kuivalle liinalle (suosittelemme Duo Wipes -liinoja) tai suoraan prismalle.

VAIHE 2



Levitä vaahto linssin pintaan liinalla ja varmista, että vaahto peittää pinnan kauttaaltaan. Pintaa ei tämän jälkeen enää tarvitse pyyhkiä, ja pyyhkimistä tulee itse asiassa välttää, jotta liina ei ala nukkaantua.

**Huomaa:** Hävitä käytetty liina paikallisten määräysten mukaisesti. Älä huuhtelee liinaa äläkä käytä sitä uudelleen.

VAIHE 3



Jätä pinta kuivumaan ja varmista, että vaahto saa vaikuttaa vähintään **30 sekunnin** ajan.

VAIHE 4



Huuhtelee linssi laadultaan asianmukaisella vedellä.

**Huomaa:** Säilytä lääkinnällistä laitetta sairaalan protokollan mukaisesti laitteen vaurioitumisen tai uudelleenkontaminoitumisen ehkäisemiseksi.

**Tristel™**

Laatija: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, Iso-Britannia, CB8 7NY  
puh. +44 (0) 1638 721500 – mail@tristel.com – www.tristel.com

Hong Kong ja Taiwan: 21st Floor, 168 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong  
puh. +852 2895 6968 – faksi +852 2869 4388

Katso lisätietoja Tristelin patentista osoitteesta <http://www.our-patents.info/tristel>.

Copyright © Tristel Solutions  
Mkt-Wal-002-7  
Helmikuu 2020